

Le invitamos a descargar la aplicación MyNovocure®

MyNovocure es una aplicación que ayuda a los pacientes a gestionar su tratamiento diario con Optune Gio®.

La aplicación MyNovocure

Gestiona tu tratamiento de forma sencilla:

- ✓ Consulta tu tiempo de uso diario
- ✓ Resuelve incidencias técnicas fácilmente
- ✓ Accede a recursos y consejos útiles

Descargar en
Google Play



Descargar en
App Store



Para más información sobre Optune Gio (incluyendo contraindicaciones, advertencias, precauciones y avisos), por favor lea el Manual de Usuario.


<https://manuals.novocure.eu/>

Instrucciones para instalar la aplicación MyNovocure y registrarse

- 1 Descarga la aplicación MyNovocure en tu teléfono móvil escaneando uno de los dos códigos QR



- 2 Abre la aplicación MyNovocure y haz clic en «Registrarse»

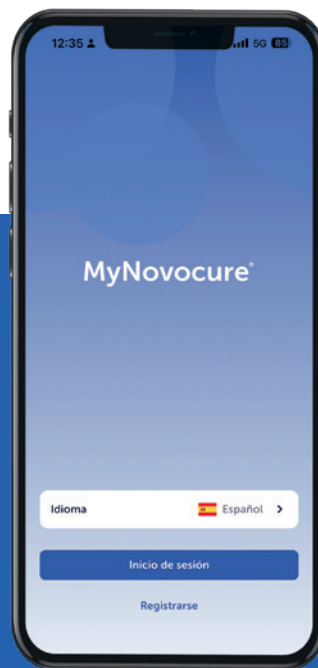

- 3 Introduce tu dirección de correo electrónico



- 4 Introduce el código de confirmación recibido por SMS



- 5 Crea tu contraseña. Para que el proceso de registro sea más cómodo, también puedes configurar el reconocimiento facial



MyNovocure®

Optune Gio es un dispositivo sanitario clase IIb con marcado CE (CE-0197). Optune Gio está indicado para el tratamiento de pacientes adultos (18 años o más) con glioma de grado 4 de la OMS de diagnóstico reciente, después de cirugía citorreductora máxima o biopsia, radioterapia o quimioterapia concomitante con temozolomida de mantenimiento con o sin lomustina, y de suspender la terapia sistémica. **CONTRAINDICACIONES** No utilice el kit de tratamiento Optune Gio si está embarazada, cree que podría estar embarazada o está tratando de quedarse embarazada. Si es usted una mujer fértil, debe usar un método anticonceptivo cuando use el dispositivo. El kit de tratamiento Optune Gio no se ha probado en mujeres embarazadas. No use el kit de tratamiento Optune Gio si tiene una enfermedad neurológica adicional significativa (trastorno convulsivo primario, demencia, trastorno neurológico degenerativo progresivo, me-ningitis o encefalitis, hidrocefalia con aumento de la presión intracraneal). No use el kit de tratamiento Optune Gio si sabe que es sensible a los hidrogeles conductores como el gel que se usa en los parches adhesivos del electrocardiograma (ECG) o los electrodos de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS). En este caso, el contacto de la piel con el gel utilizado con el kit de tratamiento Optune Gio puede causar un aumento del enrojecimiento y la picazón y, en raras ocasiones, incluso puede provocar reacciones alérgicas graves, como choque anafiláctico e insuficiencia respiratoria. No use Optune Gio si tiene un producto sanitario implantado activo, un defecto en el cráneo (como falta de hueso sin reemplazo) o fragmentos de bala. Ejemplos de dispositivos electrónicos activos son los estimuladores cerebrales profundos, los estimuladores de la médula espinal, los estimuladores del nervio vago, los marcapasos y los desfibriladores. No se ha probado el uso del kit de tratamiento Optune Gio junto con dispositivos electrónicos implantados, por lo que cabe la posibilidad de que estos provoquen un funcionamiento incorrecto del dispositivo implantado. No se ha probado el uso del kit de tratamiento Optune Gio en personas con defectos o fragmentos de bala en el cráneo, por lo que cabe la posibilidad de que se produzcan daños tisulares o de que el tratamiento resulte ineficaz. Para obtener información más detallada sobre Optune Gio, consulte el manual del uso: manuals.novocure.eu.