

CÓMO INTEGRAR **OPTUNE GIO®** EN SU VIDA DIARIA



Este folleto contiene fotos
de pacientes, que se
utilizan con su aprobación
y reflejan su estado de
salud en el momento en el
que fueron tomadas.

Imagen de una actriz

Incorpore Optune Gio a su rutina diaria

Optune Gio® es un dispositivo portátil diseñado para ser integrado a su vida diaria. La experiencia demuestra que durante el tratamiento un gran número de personas puede mantener su rutina diaria.



Imagen de una actriz

Utilice el dispositivo el máximo de tiempo posible

Al inicio del tratamiento con Optune Gio, su médico conversará con usted sobre el tiempo que debe durar el tratamiento con Optune Gio.

Para lograr la mejor respuesta posible al tratamiento, el dispositivo debe utilizarse de forma continua. Por favor consulte el Manual de Usuario para más información respecto de la duración media mínima recomendada de uso¹.

Un ensayo clínico de gran envergadura ha demostrado que el uso más prolongado posible de Optune Gio produce una mejor respuesta al tratamiento.^{2,3}



Paciente de Optune Gio

Si lo desea, puede cubrir los Transducer Arrays (transductores) de Optune Gio

Puede usar peluca o prendas si desea cubrir los Arrays, siempre y cuando sean ligeros y transpirables.



Paciente de Optune Gio



Paciente de Optune Gio



Imagen de una actriz

Opciones de transporte

Al inicio del tratamiento, recibirá un bolso convertible y una mochila especialmente diseñadas para ello.

Puede llevar Optune Gio® con usted, al tratarse de un dispositivo portátil, lo que le permitirá mantener su movilidad y utilizar el tratamiento mientras realiza sus actividades diarias.



Mochila con un compartimento adicional para objetos personales.



Bolso convertible acorde a su comodidad.



Imagen de un actor



Paciente de Optune Gio

Viajar con Optune Gio

Realizar viajes en tren, automovil y otros medios de transporte puede ser posible. Siempre consulte a su médico en caso de duda.

Si va a volar puede ser necesaria cierta documentación relativa al producto sanitario. Hable con su técnico en soporte de dispositivos de Novocure® antes del viaje, para que le facilite la ayuda necesaria.



Paciente de Optune Gio

Practicar actividad física

- Por lo general, puede realizar diversas actividades deportivas con Optune Gio.
- Algunos pacientes lo hacen llevando consigo Optune Gio, mientras otros aprovechan el momento de intercambio de los Arrays para realizar su actividad sin el dispositivo.

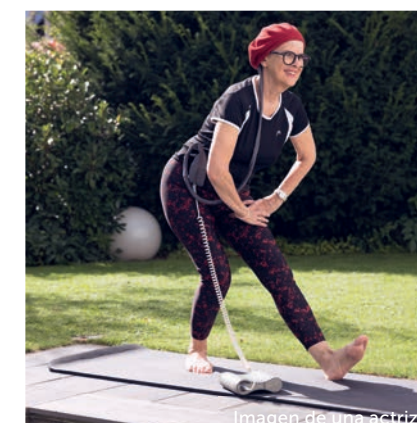


Imagen de una actriz



Paciente de Optune Gio

Dormir con Optune Gio®

Puede utilizar Optune Gio® mientras duerme conectándolo a una fuente de alimentación, lo que evita tener que cambiar las baterías durante su descanso.



Imagen de una actriz

Ducharse con Optune Gio

Recuerde que ni el dispositivo ni los arrays deben entrar en contacto con el agua.

Es posible ducharse mientras está en tratamiento con Optune Gio, debiendo proteger los Arrays con un gorro de ducha y desconectándolos del generador de corriente.

Recuerde dejar el generador de TTFields siempre fuera del cuarto de baño.



Efectos secundarios de Optune Gio

En general, el tratamiento con Optune Gio se tolera bien.

El efecto secundario más común es la irritación del cuero cabelludo en el área de colocación de los Arrays¹, y éste generalmente se puede manejar con éxito siguiendo las medidas recomendadas por su médico.



Imagen de una actriz



Optune Gio es un dispositivo sanitario clase IIB con marcado CE (CE-0197). Optune Gio está indicado para el tratamiento de pacientes adultos (18 años o más) con glioma de grado 4 de la OMS de diagnóstico reciente, después de cirugía citorreductora máxima o biopsia, radioterapia o quimioterapia concomitante con temozolomida de mantenimiento con o sin lomustina, y de suspender la terapia sistémica.

Para más información sobre Optune Gio (incluyendo contraindicaciones, advertencias, precauciones y avisos), por favor lea el Manual de Usuario. <https://manuals.novocure.eu/>



Imagen de una actriz

Para obtener más información y materiales educativos sobre Optune Gio, visite este sitio web:

OptuneGio.es



Referencias:

1. Optune Gio Manual del Usuario, Diciembre 2024, <https://manuals.novocure.eu/>
2. Stupp R, et al. Effect of tumor-treating fields plus maintenance temozolomide vs maintenance temozolomide alone on survival in patients with glioblastoma: a randomized clinical trial. JAMA. 2017;318(23):2306-2316. doi:10.1001/jama.2017.18718
3. Toms S. A. et al. Increased compliance with tumor treating fields therapy is prognostic for improved survival in the treatment of glioblastoma: a subgroup analysis of the EF-14 phase III trial. J Neurooncol 2019; 141:467-473

novocure®

OPTUNE
GIO®

Novocure Spain S.L.

©2026 Novocure GmbH. Todos los derechos reservados. Optune Gio y Novocure son marcas registradas de Novocure GmbH. ES-OPG-00096 v 1.0 Febrero de 2026